



Soluție oftalmică hipertonică sterilă
Flacon de 10 ml, fără conservanți

Ededay este un dispozitiv medical care contribuie la ameliorarea temporară a simptomelor asociate edemului cornean.

Compoziție

Hialuronat de sodiu, acid boric, Kolliphor P407, trometamol, sorbitol, apă.

Ce este Ededay?

Un flacon de Ededay conține 10 ml soluție oftalmică hipertonică sterilă. Nu conține conservanți. Datorită formulei sale inovatoare, Ededay are proprietăți mucoadezive: permițând o aderență crescută la suprafața oculară, asigurând hidratarea și protecția ochiului.

Când se folosește Ededay?

Ededay este o soluție oftalmică hipertonică sterilă, indicată pentru ameliorarea temporară a simptomelor asociate edemului cornean, cum ar fi tulburările de vedere și durerea.

Ededay prezintă o osmolaritate crescută față de filmul lacrimal: diferența dintre aceste osmolarități permite resorbția lichidului în exces, asociat edemului. Aplicarea Ededay conduce la o creștere a osmolarității suprafeței corneene, ceea ce determină cedarea apei din straturile corneene. Hialuronatul de sodiu din compoziția Ededay formează o peliculă protectoare pe suprafața ochiului asigurând protecția și hidratarea sa. Datorită proprietăților sale de lubrifiere și protecție mecanică, hialuronatul de sodiu permite o aplicare ușoară a Ededay, reducând senzația de arsură și iritație specifică soluțiilor hipertonică.

Cum se folosește Ededay?

- Spălați-vă bine pe mâini înainte de a folosi Ededay.
- Lăsați capul pe spate și trageți ușor în jos pleoapa inferioară, astfel încât să formeze un buzunar.
- Țineți flaconul în poziție verticală deasupra ochiului, astfel încât să priviți spre vârful albastru al flaconului.
- Strângeți ușor flaconul pentru a aplica o picătură în ochi. Repetați procesul la celălalt ochi.
- Evitați contactul vârfului flaconului cu ochiul sau cu degetele.
- Închideți bine flaconul după utilizare.
- Aplicați una sau două picături în fiecare ochi la un interval de trei sau patru ore, sau conform indicațiilor medicului.

Atenționări:

- Nu folosiți Ededay dacă aveți hipersensibilitate sau o alergie cunoscută la oricare din componentele sale.
- În caz de iritare oculară, încetați utilizarea Ededay și consultați medicul.
- Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat.
- Nu utilizați produsul după data de expirare.
- A se folosi în termen de 8 săptămâni de la prima deschidere.
- A nu se înghiți.

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Evitați contactul vârfului flaconului de EdeDay cu ochiul sau cu degetele.
- Nu utilizați în același timp flaconul de EdeDay cu alte persoane.
- În cazuri rare, datorită vâscozității soluției, administrarea de EdeDay poate cauza vedere încețoșată. Așteptați câteva minute înainte de a începe activități care necesită o vedere clară.
- Scoateți lentilele de contact înainte de a folosi EdeDay, pentru a evita deteriorarea suprafeței acestora. Așteptați cel puțin treizeci de minute înainte de a le purta din nou.
- Dacă mai folosiți și alte picături sau unguente oftalmice lăsați intervale de cel puțin treizeci de minute între aplicarea acestora.
- În timpul sarcinii și alăptării, consultați un medic înainte de a folosi EdeDay.
- Produsul a fost conceput pentru o utilizare continuă pe o perioadă de cel mult șapte zile consecutive; dacă simptomele dvs. nu se ameliorează, consultați un medic.

Data revizuirii: Octombrie 2019

Distribuitor:

MagnaPharm Marketing & Sales ROMANIA SRL,
 Str. Av. Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2, din incinta Expo Business Park,
 etaj 7, Sector 1, București, Cod poștal 012095,
 Tel: +4 0372 502 200,
 Fax: +4 0372 502 255



NTC S.r.l.
 Via Luigi Razza, 3
 20124 Milan Italy



ntc
 Novelty. Technology. Care.

