

**MASTER RO**

**ALLERGIX FREE, soluție oftalmică spray**

Acest produs este un dispozitiv medical. Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.  
Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie nevoie să îl citiți din nou.

**INDICAȚII**

**ALLERGIX FREE** este indicat pentru calmarea, hidratarea și lubrifierea ochilor uscați, în special în caz de alergie.

**ALLERGIX FREE** ameliorează mâncărimea, uscăciunea, iritația și înroșirea ochilor.  
Numai pentru uz ocular.

**CONTRAINDICAȚII**

Nu se injectează și nu se înghite.

Nu utilizați **ALLERGIX FREE** dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele sale (a se vedea descrierea dispozitivului).

**DESCRIEREA DISPOZITIVULUI**

**ALLERGIX FREE** este o soluție oftalmică sterilă, lubrifiantă și lenitivă care conține o soluție lipozomală (4%) pe bază de complex PER-LIP®, hialuronat de sodiu 0,2%, acid boric, tetraborat de sodiu decahidrat, PEG 300, EDTA disodic dihidrat, clorură de sodiu, apă.

**ALLERGIX FREE** este un produs steril, fără conservanți, livrat într-un flacon de 10 ml, echipat cu sistemul inovator de închidere APTAR®, multidoză, care previne contaminarea bacteriană pe durata tratamentului.

Absența conservanților permite protejarea țesuturilor oculare și, de asemenea, nu cauzează reacții la utilizatorii care sunt sensibili la conservanți.

**ALLERGIX FREE** este o alternativă plăcută și ușor de utilizat pentru persoanele care consideră dificilă utilizarea picăturilor pentru ochi.

Compatibil cu lentilele de contact moi.

Produsul nu cauzează întinderea machiajului, atât timp cât machiajul este rezistent la apă.

**BENEFICIILE, PERFORMANȚĂ ȘI MECANISM DE ACȚIUNE**

**ALLERGIX FREE** ameliorează mâncărimea, uscăciunea, iritația și înroșirea ochilor:

- oferă prospețime
- calmează simptomele ochilor iritați
- previne deshidratarea suprafeței oculare
- limitează evaporarea apei de pe suprafața oculară
- restabilește echilibrul natural al suprafeței oculare și stabilizează filmul lacrimal, alterat de factori de stres din mediu, cum ar fi alergenii, aerul condiționat, expunerea la vânt,

praf, poluare și de oboseala ochilor datorată utilizării prelungite a lentilelor de contact, computerului și condițiilor de iluminare nefavorabile, etc...

**ALLERGIX FREE** poate fi utilizat ca adjuvant în terapiile antihistaminice.

**ALLERGIX FREE** este bine tolerat pe suprafața oculară.

Hialuronatul de sodiu se găsește în mod natural în ochi. Acesta îmbunătățește stabilitatea filmului lacrimal și menține suprafața oculară lubrifiată, hidratată și protejată.

Spray-ul pulverizează lipozomi (componentă uleioasă ca fosfolipid) în ochi, ajutând la repararea stratului lipidic, abordând astfel instabilitatea lipidică care cauzează ochii uscați, ușurând iritarea și disconfortul patologiilor oculare.

Acidul hialuronic ajută la refacerea și îmbunătățirea stabilității filmului lacrimal, menținând suprafața ochiului mai hidratată și lubrifiată.

### **RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU UTILIZARE**

Doze și mod de administrare: Se recomandă pulverizarea produsului pe pleoapele închise o dată sau de două ori la fiecare aplicare, de 3 până la 4 ori pe zi.

Nu este necesară o pregătire specială pentru a utiliza Allergix Free .

Spălați-vă bine pe mâini înainte de utilizare.

Țineți bine flaconul cu degetul mare sau arătător pe duză și aveți grijă să nu astupați orificiul duzei.

Țineți flaconul la aproximativ 10 cm de ochi.

Aplicați pe ochiul închis, exercitând o presiune fermă pe duză, permițând nebulizarea corectă a soluției.

Repețați la celălalt ochi, dacă este necesar.

### **PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE**

Produs cu utilizare multiplă de către un singur pacient.

Nu împărțiți flaconul între persoane diferite pentru a preveni contaminarea încrucișată.

Verificați dacă ambalajul este intact înainte de prima utilizare a acestui produs.

Pentru a evita contaminarea, nu atingeți suprafața oculară sau orice altceva cu duza.

Trebuie să contactați un profesionist din domeniul sănătății dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează.

### **ATENȚIONĂRI**

Nu lăsați produsul și componentele sale la vederea și la îndemâna copiilor.

În caz de iritare a ochilor, nu mai utilizați produsul și adresați-vă medicului dumneavoastră.

Dacă observați orice efecte secundare sau senzații neobișnuite după utilizarea acestui produs, vă rugăm să contactați un profesionist din domeniul sănătății și să raportați informațiile distribuitorului local, producătorului (vezi datele de contact de la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare).

Nu utilizați produsul pentru copiii sub 6 ani.

În caz de sarcină sau alăptare, consultați medicul înainte de a utiliza produsul.

### **CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI ELIMINARE**

Depozitați produsul departe de sursele de căldură, într-un loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 9°C și 25°C.

Nu utilizați după data de expirare, care este marcată pe flacon și pe cutia exterioară.

Data expirării se referă la ultima zi a lunii respective, atât timp cât ambalajul este intact și a fost depozitat corect.

Produsul poate fi utilizat până la 90 de zile de la prima deschidere a flaconului. După această perioadă, aruncați orice rest de produs în mod responsabil și conform reglementărilor locale.

*Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul.*

Data emiterii și versiunea instrucțiunilor de utilizare: 09/2024

#### **Producător:**

 NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3  
20124 Milano











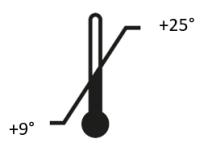

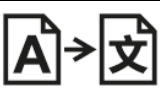




#### **Distribuitor:**



**Per-Lip®** marcă înregistrată a NTC.

**SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR DE PE AMBALAJ:**

	Producător		Distribuitor
	Codul lotului		Consultați instrucțiunile de utilizare
	Dispozitiv medical		Identificator unic al dispozitivului
	Pacient unic Utilizare multiplă		Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați <i>instrucțiuni de utilizare</i>
	Data limită de consum		Atenție
	Limita de temperatură		Sterilizat cu tehnici de prelucrare aseptică
	Traducere		Conține substanțe periculoase (acid boric, tetraborat de sodiu >0,1%)
	Data fabricației		